



САНОРИН
аква

НАТУРА

Спрей назальный
САНОРИН АКВА НАТУРА
ПРОПОЛИС ТИМЬЯН 20 мл
для взрослых и детей старше 3 лет

Используется для промывания и увлажнения слизистой оболочки полости носа и носоглотки, при остром и хроническом насморке.

Оказывает барьерное действие при отеке или заложенности носа и носовых пазух. Способствует удалению избытка жидкости и слизи.

Наличие в составе экстрактов прополиса и тимьяна способствует усилению общего действия спрея.

Подходит для применения в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях. Для индивидуального применения. Для взрослых и детей старше 3 лет.

Показания

Спрей назальный САНОРИН АКВА НАТУРА ПРОПОЛИС ТИМЬЯН применяется для гигиены полости носа при таких заболеваниях, как ринит и грипп, которые могут сопровождаться дискомфортом, зудом и жжением слизистой полости носа и носоглотки. Также применяется для профилактики неблагоприятных воздействий, вызванных загрязнением и сухостью воздуха, табачным дымом.

Комплект

В состав каждой потребительской упаковки входит:

- картонная пачка со спреем во флаконе объемом 20 мл с распылителем;
- колпачок;
- инструкция по применению.

Способ применения

Перед использованием встряхните флакон и удалите защитный колпачок. Во время первого применения нажмите несколько раз на дозирующее устройство для распыления спрея, если потребуется. Мягко введите назальный аппликатор в один носовой ход, слегка массируя крылья носа, и нажмите на аппликатор для распыления продукта. Повторите процедуру для второго носового прохода. Очистите кончик с помощью воды и высушите. Закройте назальный аппликатор защитным колпачком до следующего применения. Проводить по 1-2 вспрыскивания в каждый носовой ход 2-3 раза в сутки.

Состав на 1 г:

вода очищенная 19,182 г, хлористоводородная кислота 0,5 Н 0,490 г, натрия хлорид 0,2 г, прополиса экстракт глицеринизированный 0,140 г, натрия метилпарабен 0,046 г, тимьяна экстракт глицеринизированный 0,02 г, калия сорбат 0,02 г.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость к каким-либо компонентам, входящим в состав медицинского изделия. Беременность и период лактации. Дети до 3 лет.

Возможные осложнения и побочные эффекты при применении

Прекратите применение изделия при появлении раздражения.

Обратитесь к врачу:

- если раздражение продолжается;
- если есть необходимость использовать данное медицинское изделие регулярно.

Требования к безопасности и меры предосторожности

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов флакон должен использоваться только одним человеком.

Из-за блокирующего эффекта спрея, во время его применения на несколько минут может появиться несильное ощущение заложенности носа. Если постоянный дискомфорт появляется во время применения спрея регулярно, прекратите использование. Применять только в вертикальном положении.

Условия хранения

Хранить при температуре от +10°C до +40°C. Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности

3 года с даты производства. Смотрите дату производства на упаковке. Не применять после истечения срока годности. Не использовать раствор более 1 месяца после вскрытия.

Охрана окружающей среды

Медицинское изделие при должной утилизации не наносит вреда окружающей среде. Изделие относится к классу опасности А. Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. В домашних условиях утилизируют как бытовые отходы.

Рекламация

По всем вопросам, включая жалобы на продукцию, обращаться к Уполномоченному Представителю в Российской Федерации: «ООО «Ксантис Фарма»

Юридический адрес: 117335, Россия, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58, 8 этаж, помещение XXV, комнаты 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16

Фактический адрес: 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58, БЦ iCUBE

Телефон: +7 495 970 07 50

E-mail: info.ru@xantispharma.com

Сведения о производителе медицинского изделия

Производитель медицинского изделия
«ФАРМАЛИНК, С. Л.» (PHARMALINK, S. L.)

Место производства:

1. PHARMALINK, S. L. PARC TECNOLOGIC DEL VALLES – AVDA. UNIVERSITAT AUTONOMA 13 – 08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BCNA) SPAIN
2. PHARMALINK, S. L. CTRA. DE VALLS TV-2034, KM 6 – 43886 VILABELLA (TARRAGONA) SPAIN

Гарантийные обязательства

«PHARMALINK, S. L.», PARC TECNOLOGIC DEL VALLES – AVDA. UNIVERSITAT AUTONOMA 13 – 08290 CERDANYOLA DEL VALLES (BCNA) SPAIN («ФАРМАЛИНК, С. Л.», ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ДЕЛЬ ВАЛЛЕС - АВЕНИДА УНИВЕРСИТАТ АУТНОМА 13-08290 СЕРДАНЬОЛА ДЕЛЬ ВАЛЛЕС (БАРСЕЛОНА) ИСПАНИЯ), тел. +34 666 570 401, гарантирует соответствие данного медицинского изделия всем параметрам и свойствам, указанным в данном документе при условии соблюдения условий транспортировки, хранения и применения.



Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8447 от 06.06.2019 г.