



**САНОРИН**  
**аква**

**МОРСКАЯ ВОДА**

Спрей назальный  
**САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА**  
**гипертоническая 120 мл**  
**для взрослых и детей старше 6 лет**

**Спрей назальный САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА гипертоническая 120 мл** – используется для промывания и увлажнения слизистой оболочки полости носа и носоглотки при остром и хроническом насморке. Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях. Для взрослых и детей старше 6 лет. Для индивидуального применения.

**Состав:** вода морская – 84,0 мл (Морская вода, входящая в состав изделия, имеет природное происхождение, добывается в заливе Канкаль (Бретань, Франция)), вода очищенная – 36,0 мл.

#### **Свойства медицинского изделия**

Спрей назальный САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА гипертоническая 120 мл, способствуя физическому удалению избытка жидкости и слизи, снимает отек и заложенность носа и носовых пазух за счет разности осмотического давления, так как раствор является гипертоническим.

- Уменьшает заложенность и восстанавливает дыхание при насморке.
- Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки.
- Раствор вымывает микробы и аллергены на поверхности слизистой оболочки носа и носоглотки.
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа.
- Увлажняет слизистую носовой полости в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе систем центрального отопления, кондиционирования, в условиях неблагоприятной экологической обстановки, а также во время авиаперелетов.
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия оболочки полости носа.
- Повышает местный иммунитет.

#### **Показания к применению**

Профилактика и комплексное лечение острых и хронических респираторных заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки (инфекционных, атрофических):

- острые и хронические риниты, синуситы, аденоидиты;
- вазомоторные и субатрофические риниты;
- ежедневная гигиена полости носа;
- подготовка слизистой носовой полости к применению назальных лекарственных средств.

#### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость к каким-либо компонентам, входящим в состав медицинского изделия.

Дети до 6 лет.

#### **Информация о потенциальных потребителях**

Для детей с 6 лет и взрослых

## Меры предосторожности

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов баллон с аэрозольным клапаном должен использоваться только одним человеком.

Из-за блокирующего эффекта данного изделия, может появиться небольшое ощущение заложенности носа во время его использования, это ощущение исчезает через несколько минут. Если стойкий дискомфорт появляется во время его использования, прекратите лечение. Использовать только в вертикальном положении. Не использовать раствор более 3 месяцев после вскрытия.

## Побочное действие

Ощущение легкого жжения и заложенность носа.

## Способ применения

1. Встряхните баллон с аэрозольным клапаном перед использованием и удалите защитный колпачок. При первом применении может потребоваться несколько раз нажать на дозирующее устройство до распыления продукта
2. Наклоните голову назад
3. Мягко введите назальный аппликатор в носовой ход, находящийся сверху
4. Промывайте носовую полость в течение нескольких секунд
5. Высморкайтесь
6. Проведите процедуру с другим носовым ходом
7. При необходимости всю процедуру можно повторить
8. Очистите распылительную головку теплой водой с мыльным раствором и высушите при комнатной температуре
9. Закройте назальный аппликатор защитным колпачком до следующего применения.

Проводить промывание каждого носового хода 2-4 раза в сутки, при необходимости можно использовать чаще, но не более 8 раз в сутки.

## Условия хранения

Не использовать раствор более 3 месяцев после вскрытия.

Хранить в прохладном сухом, недоступном для детей месте при температуре от +1°C до +40° C

## Срок годности

3 года с даты производства.

Не применять после истечения срока годности.

### Изготовитель:

«PHARMALINK, S. L.», Parc Tecnologic Del Valles – Avda. Universitat Autònoma 13 – 08290 Cerdanyola Del Valles (BCNA) Spain («Фармалинк, С. Л.», Технологический Парк Дель Валлес – Авенида Университат Аутонома 13-08290 Серданыола Дель Валлес (Барселона) Испания)

### Уполномоченный представитель производителя на территории

России: ООО «Ксантис Фарма»

### Адрес места нахождения:

Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58, 8 этаж, помещение XXV, комнаты 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16.

### Адрес для рекламаций:

117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58.

Тел.: +7 495 970 07 50

E-mail: info.ru@xantispharma.com

