



САНОРИН аква

МОРСКАЯ ВОДА

Спрей назальный САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА изотоническая 120 мл для детей с рождения

Спрей назальный САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА изотоническая 120 мл – используется для промывания и увлажнения слизистой оболочки полости носа и носоглотки. Подходит для использования в домашних условиях и лечебно-профилактических учреждениях. Для детей с рождения. Для индивидуального применения.

Состав: вода очищенная – 84,0 мл, вода морская – 36,0 мл.

Морская вода, входящая в состав изделия, имеет природное происхождение, добывается в заливе Канкаль (Бретань, Франция).

Свойства медицинского изделия

Спрей назальный САНОРИН АКВА МОРСКАЯ ВОДА изотоническая 120 мл увлажняет слизистую оболочку носа, поддерживает ее физиологическое состояние, ускоряет процессы регенерации, а также снимает отек и заложенность носа и носовых пазух.

- Тщательно промывает все отделы полости носа и носоглотки.
- Повышает терапевтическую эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа.
- Увлажняет слизистую носовой полости в условиях чрезмерно сухого воздуха при работе систем центрального отопления, кондиционирования, в условиях неблагоприятной экологической обстановки, а также во время авиаперелетов.
- Стимулирует защитную функцию реснитчатого эпителия оболочки полости носа.
- Повышает местный иммунитет.

Показания к применению

Профилактика и комплексное лечение респираторных заболеваний полости носа, околоносовых пазух, носоглотки:

- насморк у детей с рождения;
- ежедневная гигиена полости носа;
- использование после хирургических вмешательств в полости носа.

Противопоказания

Не выявлены

Информация о потенциальных потребителях

Для детей с рождения

Меры предосторожности

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

По гигиеническим причинам и для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов баллон с аэрозольным клапаном должен использоваться только одним человеком.

Использовать только в вертикальном положении.

Не использовать раствор более 3 месяцев после вскрытия.

Побочное действие

Не выявлены

Способ применения

Встряхните баллон с аэрозольным клапаном перед использованием и удалите защитный колпачок. При первом применении может потребоваться несколько раз нажать на дозирующее устройство до распыления продукта.

Детям до 2 лет необходимо проводить процедуру промывания в положении лежа

1. Поверните голову ребенка набок
2. Мягко введите назальный аппликатор в носовой ход, находящийся сверху
3. Промывайте носовую полость в течение нескольких секунд
4. Посадите ребенка и помогите ему высморкаться
5. Проведите процедуру с другим носовым ходом
6. При необходимости всю процедуру можно повторить
7. Очистите распылительную головку теплой водой с мыльным раствором и высушите при комнатной температуре.
8. Закройте назальный аппликатор защитным колпачком до следующего применения.

Дети старше 3 лет проводят процедуру промывания в положении стоя

1. Ребенок должен наклонить голову набок
2. Мягко ввести назальный аппликатор в носовой ход, находящийся сверху
3. Промывать носовую полость в течение нескольких секунд
4. Высморгаться
5. Провести процедуру с другим носовым ходом
6. При необходимости всю процедуру можно повторить
7. Очистите распылительную головку теплой водой с мыльным раствором и высушите при комнатной температуре
8. Закройте назальный аппликатор защитным колпачком до следующего применения.

Проводить промывание каждого носового хода по 2-4 раза в сутки, при необходимости можно использовать чаще.

Условия хранения

Не использовать раствор более 3 месяцев после вскрытия.

Хранить в прохладном сухом, недоступном для детей месте при температуре от +1°C до +40°C.

Срок годности

3 года с даты производства.

Не применять после истечения срока годности.

Изготовитель:

«PHARMALINK, S. L.», Parc Tecnologic Del Valles – Avda. Universitat Autònoma 13 – 08290 Cerdanyola Del Valles (BCNA) Spain («Фармалинк, С. Л.», Технологический Парк Дель Валлес – Авенида Университат Аутонома 13-08290 Серданьола Дель Валлес (Барселона) Испания)

Уполномоченный представитель производителя на территории России: ООО «Ксантис Фарма»

Адрес места нахождения:

Россия, 117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58, 8 этаж, помещение XXV, комнаты 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16.

Адрес для рекламаций:

117335, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 58.

Тел.: +7 495 970 07 50

E-mail: info.ru@xantispharma.com

